


Guida Rapida PCECG 1200 per Test da Sforzo

- Cliccare sul Programma Stress. Si presenta la seguente immagine.

Stress PC ECG Application
File Visualizza Aiuto




- Cliccare su Setup per aprire la finestra delle impostazioni.

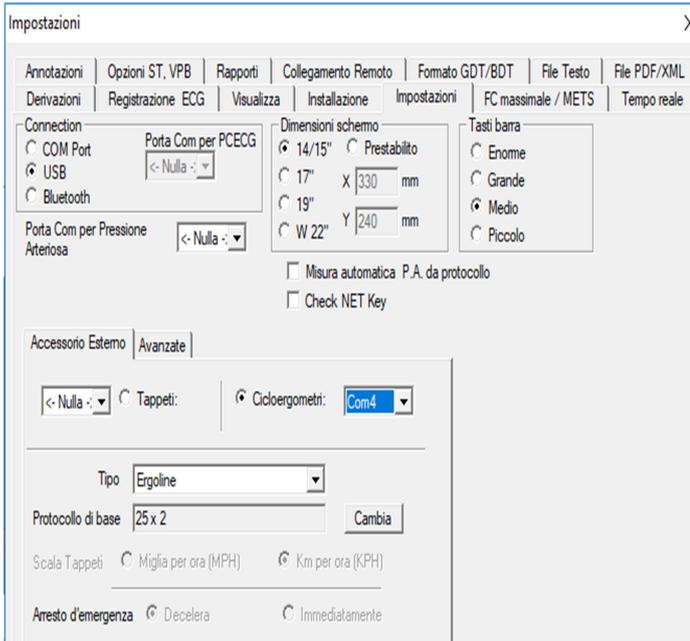

In **Impostazioni** selezionare:
 In **Connection** USB o Bluetooth, in funzione dell'acquisitore ECG.
 In **Cicloergometro**, la porta alla quale è connesso; il Tipo ed il Protocollo.
 Con **Cambia** si apre l'elenco dei protocolli memorizzati.
 Se si desidera impostarne altri, selezionare nuovo e comporre la sequenza di Watt e tempo desiderati.
 Per il Treadmill effettuare le medesime impostazioni.
 In **Tempo Reale** selezionare ciò che si desidera venga stampato in tempo reale.
 In **Installazione** inserire l'intestazione dell'esame ed i nomi dei medici.
 Aprire le altre funzioni ed impostarle a piacere.


- Cliccare su Nuovo. Si apre la scheda paziente.
- Inserire tutti i dati significativi.
- Selezionare il nome del medico e Premere OK

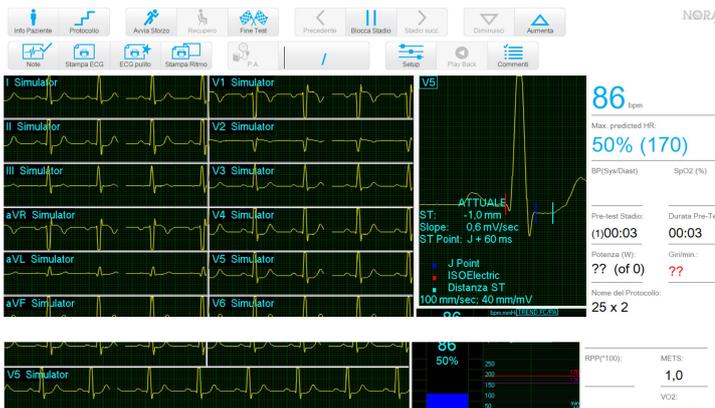

Il display inizia a presentare l'ECG del paziente. Verificare la qualità della traccia ed eventualmente modificare con Protocollo il protocollo selezionato. Dopo l'apparizione del complesso mediato, cliccare su Avvia Sforzo per avviare il Test. Durante il Test è possibile accelerare il protocollo con la freccia Stadio Successivo oppure bloccare lo stadio con Blocca Stadio; passare al comando manuale dell'ergometro con Aumenta e Diminuisci. Stampare episodi di ECG con Stampa ECG ed ECG Pulito oppure episodi successivi con Stampa Ritmo.

- Prima della fine dello stadio, inserire i valori della PA
- Al raggiungimento del massimo sforzo cliccare su Recupero per passare alla fase di recupero.
- Dopo che il paziente ha recuperato, cliccare su Fine Test per arrestare il Test.

Se il sistema dispone della chiave software S2, è possibile, con Play Back, aprire una nuova finestra dove si richiama il tracciato precedente.

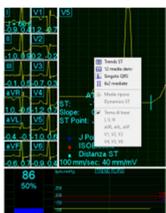

Se il monitor è sufficientemente ampio, la finestra del complesso mediato può essere sdoppiata per presentare contemporaneamente altre immagini, richiamabili con il tasto destro del mouse.

ANALISI DEI RISULTATI

Alla fine dell'esame, in funzione di quanto impostato in Impostazioni - Visualizza - Modalità Sommario, si aprirà una finestra simile alla seguente.

The screenshot displays the software interface with several windows open. On the left, a vertical scale shows values from 250 down to 0, with 'mmHg' at the top. The main window shows 'Annotazioni' (Annotations) with fields for 'Motivo del Test' (Reason for Test), 'Motivo Interruzione test' (Reason for Test Interruption), and 'Conclusioni' (Conclusions). A 'Prova test: Proprieta'' (Test Properties) window is open, showing 'Risultati Test' (Test Results) for a test on 23/03/2018 at 16:48:44. The results table is as follows:

Tempo	Stadio	Tipo	Potenza	Mass. Carico	Media Giri/min.	Nome
0:00	1	Sforzo	25	2,1	0	

Other test results shown include: Riposo (Rest) at 1, Sforzo (Effort) at 00:55, and Prova (Test) at 00:55. The 'Stadi' (Stages) table also shows 1 stage for 'Sforzo' at 25 power.

Con Mostra è possibile richiamare il tracciato in memoria e stampare gli episodi significativi.

Se il sistema dispone della chiave software S2 è possibile richiamare direttamente gli episodi aritmici.

Con Tabulati si richiama la tabella numerica dell'intero esame con l'indicazione dei livelli ST e frequenza cardiaca. Su tale tabella è possibile modificare la selezione dei valori massimi.

- Aprire Annotazioni ed inserire il Motivo del Test, il Motivo dell'interruzione del Test e le conclusioni. Se in Impostazioni - Annotazioni si sono predisposte le corrette note, queste possono essere richiamate per velocizzare la stampa delle conclusioni.
- Cliccare su Rapporto per richiamare il rapporto in PDF. Se in Impostazioni - File PDF/XML è stato spuntato Salvataggio automatico dati in formato PDF, il rapporto sarà immediatamente disponibile altrimenti dovrà essere compilato. Passare alla stampa delle pagine desiderate.
- Cliccare su Stampa se si desidera attivare direttamente la stampa.

ALTRE IMPOSTAZIONI

The screenshots show various configuration windows. The first shows 'Collegamento Remoto' (Remote Connection) settings. The second shows 'Impostazioni' (Settings) for ECG registration, including 'Modalità' (Mode) set to 'Tempo reale' (Real time) and 'Filtro' (Filter) settings. The third shows 'Impostazioni' for printing, with 'Stampa' (Print) settings highlighted in red, including 'Mostra dialogo' (Show dialog) and 'Formato stampa' (Print format) options.

In Registrazione ECG Si può cambiare la cartella di destinazione dei test. A seconda delle esigenze, impostare i parametri delle altre funzioni richiamabili, aiutandosi con il manuale completo.